


**Mogelijkheid 2. Gebruik in combinatie met HGT-VisiBel-zenders.**

Kies voor de CombiVib-zender hetzelfde kanaal als voor uw VisiBel-zenders. De kanaalinstelling vindt u aan de achterkant van het basisstation. Steek de CombiVib-zender in een 230V stop-contact. Als u nog oudere VisiBel-zenders heeft kan het zijn dan een symboollampje niet brandt.

Dit betekent niet dat de zender niet werkt. Het is ook mogelijk om de deurbel en/of telefoon rechtstreeks aan te sluiten en voor andere geluidsbronnen (bijvoorbeeld babyfoon) een HGT-VisiBel-zender te gebruiken.

<i>Signaal</i>	<i>Trilritme van ontvanger</i>	<i>Symbol</i>
<b>Deurbel 1 (Huisdeur):</b>	* * * * *	
<b>Deurbel 2 (Intercom):</b>	*** **	
<b>Telefoon</b>	* * *	
<b>Personenoproep:</b>	** ** ** ** **	
<b>Babyfoon:</b>	**** **	

**Technische gegevens:**

Voeding:	230 V, 2,5 Watt
Deurbel-ingang:	ca. 0,9 - 24 Volt, 0 - 1000 Hz
Grootte:	90 x 122 x 65 mm
Gewicht:	ca. 210g
Keurmerk:	
Kleur:	wit
Toebehoren:	3m J-11 aansluitkabel, 2 x 7m beldraad
Accessoires:	J-11 T-stuk, microfoon-adapter.

**Test op juiste werking.**

Druk hiervoor op de groene personenoproepknop op de CombiVib-zender. De trilontvanger moet nu de personenoproep-code weergeven middels trillingen en het bijbehorende symbool. Zie ook onderstaande tabel.

**Problemen bij het aansluiten?**

Indien u problemen ondervindt bij het aansluiten van de CombiVib, belt u ons dan. Wij helpen u graag.

**Garantie bepalingen.**

HGT garandeert een maximale werking van alle producten. Mochten er toch storingen optreden, weest u dan niet bezorgd. U heeft op alle apparaten 2 jaar garantie!

De garantie bepalingen houden in het kosteloos repareren en retourzenden. De kosten voor het verzenden naar ons en eventuele overige kosten komen voor uw eigen rekening. De garantie vervalt bij defecten die zijn ontstaan door onrechtmatig gebruik of indien er reeds een poging tot reparatie is gedaan door personen die hiertoe niet zijn bevoegd

**hgt.**  
Nederland

Voor vergissingen of drukfouten zijn wij niet aansprakelijk. Wijzigingen voorbehouden.  
HGT Nederland • Postbus 435 • 3800 AK Amersfoort  
Telefoon: 033 48 00 340 • Teksttelefoon: 033 48 00 341 • Telefax: 033 48 00 342  
Internet: <http://www.hgt.de> • E-Mail: [hgt-nl@hetnet.nl](mailto:hgt-nl@hetnet.nl)


BA\_NL\_9470\_CombiVib11/00

## CombiVib Type 94.7



## Gebruiksaanwijzing

**hgt.**

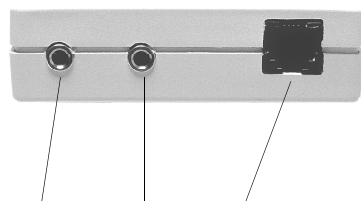

Aansluiting voor voordeurbel, intercom en telefoon

**Proficiat!**

U heeft gekozen voor de betrouwbare en gebruikersvriendelijke HGT-Combi-Vib!

**Algemene informatie over het MiniVib-systeem.**

Uw nieuwe MiniVib-trilontvanger vormt samen met de CombiVib-zender een compleet draadloos waarschuwings-systeem, dat u middels trillingen waarschuwt voor verschillende geluiden in huis.

De CombiVib-zender kan rechtstreeks op de deurbel en/of telefoon worden aangesloten, maar kan ook worden gebruikt in combinatie met HGT-Visi-Bel-zenders.

**In gebruik nemen.**

**1.) Kanaal op de basiszender instellen.**

De Combi-zender kan op acht verschillende zendkanalen worden ingesteld. U kunt het gewenste kanaal instellen door met behulp van een muntstuk de kanaalschijf aan de achterzijde van de zender te verdraaien. Een verandering van het kanaal is alleen noodzakelijk als u

buren heeft die ook VisiBel gebruiken op hetzelfde kanaal.

**2.) Trikontvanger**

Schuif de batterij-deksel open en plaats de meegeleverde 1,5 Volt batterij (AA), zoals aangegeven op de tekening in het batterijvak. Als na het plaatsen van de batterij de trilontvanger continue trilt, moet u de batterij omdraaien.

Na het aanbrengen van een nieuwe batterij zullen alle symboollampjes op de ontvanger een voor een knipperen (looplicht). Dit betekent dat er nog geen zendkanaal is geprogrammeerd. U drukt hiervoor eenmalig op de groene personenoproepknop op de Combi-Vib.

Let op! Als de trilontvanger na de laatste batterij-wissel al een keer was geprogrammeerd, moet, om de trilontvanger opnieuw te programmeren, de aanwezige batterij er ca. 10 seconden uitgehaald worden om een batterijwissel te simuleren.

**Mogelijkheid 1. Rechtstreeks aansluiten**

**Telefoon - 3 trillingen**

Dit kan alleen als u een telefoonaansluiting in de meterkast heeft.

Voor rechtstreekse aansluiting op de telefoon is de meegeleverde telefoonkabel noodzakelijk. Steek de J-11 stekker in de aansluiting rechtsonder op de Combi-Vib. Sluit de middelste 2 draden aan op de klemmen 1A en 1B van de KPN-aansluiting. Of steek de J11 stekker van de CombiVib en van uw telefoontoestel in een J11 T-stuk. Het T-stuk steekt u in de telefoonaansluiting.

**Huis-deurbel - 8 trillingen**

De linker ingang aan de onderkant van de CombiVib-zender is bestemd voor aansluiting van de huisdeurbel. Gebruikt u hiervoor de meegeleverde witte kabel met de 2-polige, 3,5 mm aansluitstekker.

Aansluiten gaat als volgt:

1. Deksel van de deurbel openen
2. Allebei de schroeven losdraaien
3. Allebei de de kabeleinden om de schroeven leggen en weer vastdraaien.
4. Deksel sluiten

5. Aansluitstekker in de linker-ingang van de CombiVib steken

**Intercom - 4 x 3 trillingen.**

De middelste ingang is bestemd voor de intercom. Gebruikt u hiervoor de meegeleverde witte kabel met de 2-polige, 3,5mm aansluitstekker. Bij de meeste intercom-installaties worden de kabeleinden direct op de luidspreker aangesloten. Als dit niet eenvoudig kan, belt u ons dan. Wij helpen u graag.

**Bijzonderheid bij intercom-aansluitingen.**

Bij een intercomaansluiting moet de kabel aan 2 klemmen worden aangesloten, indien de deurbel op een spanning tussen de 1 en 24V werkt. Indien dit technisch niet mogelijk is, adviseren wij het gebruik van onze microfoonadapter. HGT-Best.-Nr:742w.