

Ingebouwde wandcontactdoos

De ingebouwde wandcontactdoos op de voorkant van het apparaat vervangt de wandcontactdoos die u door de combizender kwijtraakt. U kunt deze gebruiken voor alle elektrische apparatuur tot 3000W.

Wat te doen bij storingen?

Als uw HGT-VisiBel-systeem niet naar behoren werkt, controleert u dan of alle zenders en ontvangers wel op hetzelfde kanaal staan ingesteld.


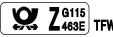
Als u de oorzaak niet kunt vinden, belt u ons dan gerust. Wij helpen u graag.

Garantiebepalingen.

HGT garandeert een maximale werking van alle producten. Mochten er toch storingen optreden, weest u dan niet bezorgd. U heeft op alle apparaten 2 jaar garantie!

De garantiebepalingen houden in het kostenloos repareren en retourzenden. De kosten voor het verzenden naar ons en eventuele overige kosten komen voor uw eigen rekening. De garantie vervalt bij defecten die zijn ontstaan door onrechtmatig gebruik of indien er reeds een poging tot reparatie is gedaan door personen die hiertoe niet zijn bevoegd

Technische gegevens

Voeding:	230 V~, 50 Hz, 2 Watt
Deurbel-ingang:	ca. 0,9 - 24 Volt, 0 - 1000 Hz
Grootte:	82 x 134 x 83 mm
Gewicht:	ca. 200 g
Keurmerk:	 
Kleur:	wit
Toebehoren:	2 x 7m deurbel-aansluitkabel, 3m telefoonkabel

hgt.
Nederland

Voor vergissingen of drukfouten zijn wij niet aansprakelijk. Wijzigingen voorbehouden.
HGT Nederland • Postbus 435 • 3800 AK Amersfoort
Telefoon: 033 48 00 340 • Teksttelefoon: 033 48 00 341 • Telefax: 033 48 00 342
Internet: <http://www.hgt.de> • E-Mail: hgt-nl@hetnet.nl

BA_NL_7480_Combizender 11/00

**Combizender
Type 74.8****Gebruiksaanwijzing**

hgt.

Ingebouwde wandcontactdoos voor alle apparatuur tot 3000W



Deurbelingang 2

Deurbelingang 1

Testknop

Proficiat!

U heeft gekozen voor het betrouwbare en gebruikersvriendelijke HGT-VisiBel-systeem.

Algemene informatie over het HGT-VisiBel-systeem

Het HGT-VisiBel-systeem bestaat uit zenders, ontvangers en enkele apparaten die niet zenden of ontvangen. De zenders vangen belangrijke geluiden in huis (bijvoorbeeld deurbel) op en zenden vervolgens een signaal via het 230V-lichtnet naar de ontvangers. De ontvangers zetten het signaal om in flitsen of schakelen een lamp.

8 zendkanalen

De zendkanalen maken het mogelijk om tot 8 lichtsystemen binnen een gebouw te gebruiken, zonder dat deze elkaar storen. Om alle zenders en ontvangers in uw woning goed te laten samenwerken dient u alle apparaten op dezelfde letter in te stellen. Dit doet u met de kanaalschijf die zich aan de achterkant van elk apparaat bevindt.

Controle-Code-Systeem

De zenders van het HGT-VisiBelsysteem zenden eenmaal per minuut een controle-sigitaal uit. Als een ontvanger deze code ontvangt, geeft hij door middel van een functie-controledlampje of een symboollampje aan dat de zend/ontvang-verbinding in orde is. Een korte blik op uw flitslamp geeft u zo meteen de zekerheid dat uw HGT-VisiBelsysteem storingsvrij functioneert.

Zo werkt de HGT combizender

Als uw telefoon rinkelt of als iemand op uw bel drukt, wordt er een zendsigitaal verstuurd via het lichtnet, dat door alle ontvangers wordt ontvangen. U kunt een telefoon en twee deurbellen (huisdeur en intercom) op de CombiZender aansluiten. Aan de hand van het flitsritme herkent u de verschillende signalen.

Flitsritme deurbel-ingang 1:

Flitsritme deurbel-ingang 2:

*** ** ** **

Flitsritme telefoon:

Aansluiting op deurbel of gong

U kunt zelf de combizender aansluiten. Dit gaat als volgt:

1. Deksel van de deurbel openen
2. Allebei de schroeven losdraaien
3. Allebei de de kabeleinden om de schroeven leggen en weer vastdraaien.
4. Deksel sluiten
5. Aansluitstekker in de gewenste ingang van de combizender steken

De combizender kunt u aansluiten op een elektrische bel van (minimaal) 2 Volt of op een deurbel met minimaal 4 batterijen. Wanneer u de combizender op een deurbel met batterijen heeft aangesloten en de combizender doet het niet, dan draait u de twee draadjes om. De combizender heeft twee ingangen voor een kabelstekker. U kunt de combizender daardoor gebruiken voor twee bellen. Bijvoorbeeld voor de voordeur en de intercom.

LET OP! De maximale veilige spanning voor een deurbel is 24 Volt. Sluit

de combizender nooit aan op een 230Volt installatie!

Aansluiting op een intercom

Bij de meeste intercom-installaties worden de kabeleinden direct op de luidspreker aangesloten. Als dit niet eenvoudig kan, belt u ons dan. Wij helpen u graag.

Aansluiting op telefoon

Dit gaat als volgt:

1. Steek de J11 stekker onderin de combizender.
2. Sluit de middelste twee draden van de kabel aan op de klemmen 1A en 1B van de KPN-aansluiting.
3. Steek de combizender in een stopcontact.
4. LET OP! Als u een J11 telefoon-aansluiting heeft, steekt u de J11 stekker in de CombiZender en in de meegeleverde J11 Ptt-stekker. Haal uw telefoontoestel uit de ptt-wandcontactdoos en steek deze bovenop de J11 stekker. Steek vervolgens de J11 stekker in de Ptt wandcontactdoos.