

Zodra er iemand aanbelt aan de huisdeur, flitst de flitslamp 8 maal langzaam en het deurbelsymbool knippert 30 seconden langzaam. Als er iemand aan de intercom belt, flitst de flitslamp 4 maal 3 keer snel en het deurbel-symbool knippert 30 seconden snel. Heeft u dus een deurbelzender met 2 ingangen, dan kunt u beide bellen goed onderscheiden.

**Test**

Iedere zender beschikt over een

testknop. Zodra er op deze testknop wordt gedrukt, moet de flitslamp met symbolen het bijbehorende flitsrime geven (zie ook tabel).

**Wat te doen bij storingen?**

Als uw HGT-VisiBel-systeem niet naar behoren werkt, controleert u dan of alle zenders en ontvangers wel op hetzelfde kanaal staan ingesteld.


Als u de oorzaak niet kunt vinden, belt u ons dan gerust. Wij helpen u graag.

**Flitsritmes**

U kunt aan het flitsritme en het symbool herkennen van welke zender het signaal afkomstig is.

Zender	Flitsritme	Symbool
Deurbel-zender 1:	* * * * *	☎
Deurbel-zender 2:	*** **	☎
Telefoon-zender:	* * *	☎
Babyfoonzender:	* * * * *	👶
Personenoproep-zender:	** ** * * * *	🗣️
Bewegings-zender:	* * * * *	🏠
Alarm-zender:	*****	⚠️

**Technische gegevens**


- Voeding: 230 V~, 50 Hz, 2 Watt
- Grootte: 90 x 122 x 65 mm
- Gewicht: ca. 200 g
- Keurmerk:  TFW
- Kleur: wit
- Accessoires: Tafelstandaard, trilkussen



BA\_NL\_7200\_Flitslamp met symbolen 11/00

Voor vergissingen of drukfouten zijn wij niet aansprakelijk. Wijzigingen voorbehouden.  
 HGT Nederland • Postbus 435 • 3800 AK Amersfoort  
 Telefoon: 033 48 00 340 • Teksttelefoon: 033 48 00 341 • Telefax: 033 48 00 342  
 Internet: <http://www.hgt.de> • E-Mail: [hgt-nl@hetnet.nl](mailto:hgt-nl@hetnet.nl)

**Flitslamp met symbolen  
Type 72.0**

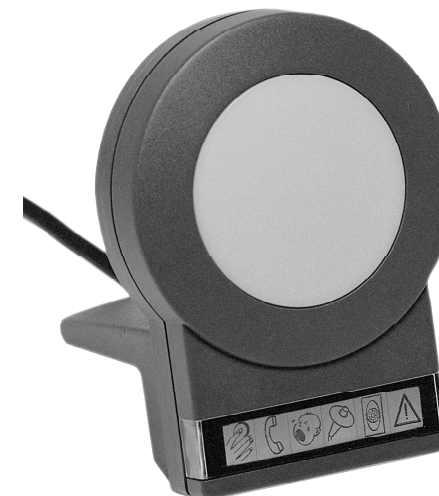

**Gebruiksaanwijzing**





Verlichte symboolaanduiding  
Knipperen betekent: Zender meldt een geluid  
Constant branden betekent: verbinding is OK

### **Proficiat!**

U heeft gekozen voor het betrouwbare en gebruikersvriendelijke HGT-VisiBel-systeem.

### **Algemene informatie over het HGT-VisiBel-systeem**

Het HGT-VisiBel-systeem bestaat uit zenders, ontvangers en enkele apparaten die niet zenden of ontvangen. De zenders vangen belangrijke geluiden in huis (bijvoorbeeld deurbel) op en zenden vervolgens een signaal via het 230V-lichtnet naar de ontvangers. De ontvangers zetten het signaal om in flitsen of schakelen een lamp.

### **Kanaal instellen.**

Om ervoor te zorgen dat uw nieuwe flitslamp de signalen van uw HGT-VisiBel-zenders goed ontvangt, dient u de flitslamp op hetzelfde kanaal in te stellen als de zenders. Met behulp van een munt kunt u de kanaalschijf aan de achterkant van de flitslamp verdraaien. Kies dezelfde letter als waarop uw zenders staan ingesteld.

Let op! Kanaal H heeft een speciale

functie. Als een zender op kanaal H staat ingesteld, dan ontvangen alle ontvangers zijn signaal, onafhankelijk op welk kanaal de ontvanger staat ingesteld.

### **Controle-Code-Systeem**

De zenders van het HGT-VisiBel-systeem zenden eenmaal per minuut een controle-signaal uit. Als een ontvanger deze code ontvangt, geeft hij door middel van een functie-controlelampje of een symboollampje aan dat de zend/ontvang-verbinding in orde is. Een korte blik op uw flitslamp geeft u zo meteen de zekerheid dat uw HGT-VisiBel-systeem storingsvrij functioneert.

### **Zo werkt de flitslamp met symbolen.**

De flitslamp met symbolen is een ontvanger van het HGT-VisiBel-systeem.

De geluiden die door de zenders worden doorgegeven, worden omgezet in flitsen met verschillende flitsritmes. Bovendien geven de zes symbolen aan welk geluid het was

(zie ook het overzicht van flitsritmes + symbolen aan de achterzijde)

### **Het controle-symbool**

Iedere zender van het lichtsysteem heeft een eigen symboolaanduiding op het venster van de flitslamp met symbolen.

### **Constant branden betekent: Verbinding is OK!**

Het constant branden van het symbool geeft aan dat de verbinding tussen de zender en ontvanger goed is.



**Deurbelzender 1+2**



**Telefoonzender**



**Babyfoonzender**



**Personenoproepzender**



**Bewegingszender**



**Alarmzender**

**Knipperen betekent: Een zender**

### **meldt een geluid.**

Zodra de flitslamp een signaal ontvangt van de zender, gaat hij flitsen en het bijbehorende symbool gaat knipperen. Het knipperen van het symbool houdt nog 30 seconden aan nadat de flitslamp al is uitgeflitst. Zo kunt u dus nog een halve minuut zien welk geluid er was.

### **Bijvoorbeeld:**

U heeft een deurbelzender met twee ingangen. Op ingang 1 is uw huisdeurbel aangesloten en op ingang 2 uw intercom. Als u de deurbelzender in een wandcontactdoos steekt, gaat korte tijd later het deurbel-symbool (hand) op de flitslamp met symbolen branden. Dat betekent: de deurbelzender is in gebruik en de verbinding is goed.