


Trilritme

Het tril- of flitsritme hangt af van de overige aangesloten HGT-apparaten. Een deurbelzender kan bijvoorbeeld het flitsritme van deurbel 1 en deurbel 2 zenden. De flitslamp Home geeft 10 seconden lang elke 640 milliseconde een flits. De akoestische signaaltoon klinkt evenlang als dat het trilritme van de MiniVib aanhoudt.

Techische gegevens:

Voeding: 2 batterijen of NiMH-Accu's (Type AA)
 Grootte: 65 x 24 x 120 mm
 Gewicht: ca. 130 g incl. Batterijen
 Keurmerk: 
 Kleur: wit

hgt.
Nederland

BA_NL_9200_MiniVib-Adapter 11/00

Voor vergissingen of drukfouten zijn wij niet aansprakelijk. Wijzigingen voorbehouden.
 HGT Nederland • Postbus 435 • 3800 AK Amersfoort
 Telefoon: 033 48 00 340 • Teksttelefoon: 033 48 00 341 • Telefax: 033 48 00 342
 Internet: <http://www.hgt.de> • E-Mail: hgt-nl@hetnet.nl


MiniVib-Adapter Type 92.0



Gebruiksaanwijzing

hgt.

Uitsparing aan de bovenzijde om de MiniVib-trilontvanger op te leggen.

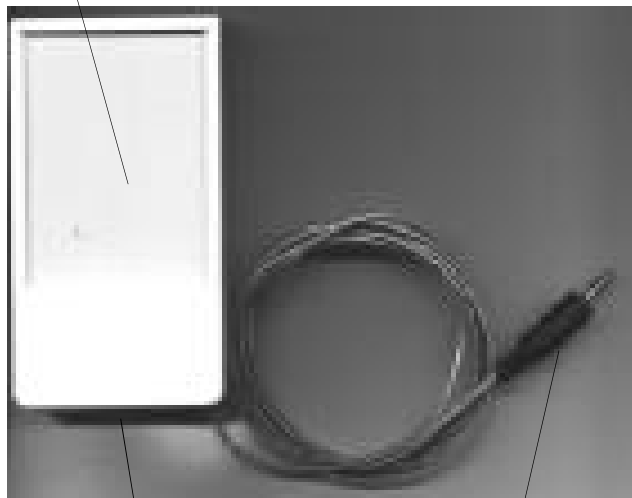

Batterijvak voor 2 AA batterijen.

3,5 mm-aansluitstekker voor aansluiting van:
HGT-Flitslamp *Direkt*,
HGT-Deurflitslamp of
HGT-Trilkussen

Proficiat!

U heeft gekozen voor de betrouwbare en gebruikersvriendelijke HGT-MiniVib!

Algemene informatie.

Uw nieuwe MiniVib-Adapter herkent de trillingen van de MiniVib trilontvanger en geeft deze door aan de andere HGT-apparaten, als u de trilontvanger, bijvoorbeeld 's nachts of tijdens het douchen, niet aan uw lichaam draagt. De trilontvanger moet op de uitsparing aan de bovenkant van de adapter worden gelegd. Zodra de trilontvanger nu een signaal ontvangt, wordt dit herkend door de adapter. De adapter geeft het vervolgens door aan een aangesloten HGT-apparaat.

Aansluitmogelijkheden.

Op de MiniVib-Adapter kunnen verschillende apparaten van het HGT-Lichtsystem worden aangesloten, o.a. de flitslamp *Direkt* of het nieuwe HGT-trilkussen.

In gebruik nemen.

1.) Kabel aansluiten.

Steek de aansluitstekker van de MiniVib-adapter in de ingang van een HGT-deurbelzender, een deurflitslamp, een flitslamp *Direkt* of een trilkussen.

2.) Batterijen aanbrengen.

Open het batterijvak aan de onderkant van de MiniVib-adapter. U moet hiervoor de kruisschroeven met een kleine schroevendraaier losdraaien. Plaats nu twee nieuwe AA-batterijen (type LR6). Sluit het batterijvak weer.



3.) Trilontvanger plaatsen.

Leg uw MiniVib-trilontvanger met de symboollampjes naar voren in de uitsparing van de MiniVib-adapter. Het witte HGT-knopje op de ontvanger moet zich direct boven het rode lampje op de adapter bevinden (zie afbeelding).

4.) Test op juiste werking.

Druk op het witte HGT-knopje op uw MiniVib-trilontvanger. Zolang de trilontvanger trilt, moet ook het rode lampje op de voorkant van de adapter branden. Wanneer er reeds een HGT-apparaat via de aansluitstekker is aangesloten, moet ook deze nu in werking treden.

Let op! Als u uw trilontvanger al voor juni 1999 heeft aangeschaft, kan het zijn dat het niet probleemloos samenwerkt met de MiniVib adapter. In dat geval kunt u uw trilontvanger kosteloos laten aanpassen door HGT. Alle nieuwere trilontvangers werken natuurlijk wel goed samen met de MiniVib-adapter. U kunt herkennen of u een geschikte trilontvanger heeft aan de aanduiding MV10 aan de binnenkant van het batterijvak.

Garantiebepalingen.

HGT garandeert een maximale werking van alle producten. Mochten er echter toch storingen optreden, weest u dan niet bezorgd. U heeft op alle apparaten 2 jaar garantie!

De garantie bepalingen houden in het kosteloos repareren en retour

zenden. De kosten voor het verzenden naar ons en eventuele overige kosten komen voor uw eigen rekening. De garantie vervalt bij defecten die zijn ontstaan door onrechtmatig gebruik of indien er reeds een poging tot reparatie is gedaan door personen die hiertoe niet zijn bevoegd.