

het trilirme van de personenoproep melden en het symboollampje van de personenoproep moet gaan branden. Zie onder.






knop op de zender te drukken. Als u de oorzaak niet kunt vinden, belt u ons dan gerust. Wij helpen u graag.

Wat te doen bij storingen?

Als uw HGT-MiniVib niet naar behoren werkt, controleert u dan eerst het zend/ontvangverbinding tussen de zender en ontvanger, door op de groene

Trilirmes.

Aan het trilirme en de symboollampjes kunt u herkennen, welk signaal er wordt gemeld:

Signaal:	Trilirme	Symbool
Deurbel 1 (huisdeur):	*****	
Deurbel 2 (intercom):	*****	
Telefoon:	* * *	
Baby:	** ** * * *	
Personenoproep:	** ** * * *	
Beweging:	**** * * *	
Alarm:	***** * * * *	

Overige meldingen

Geenzend/ontvang-contact!	***	
Batterij wisselen!	*	
Kanaal programmeren!		


Garantie bepalingen.

HGT garandeert een maximale werking van alle producten. Mochten er desondanks toch storingen optreden, weest u dan niet bezorgd. U heeft op alle apparaten 2 jaar garantie!

De garantie bepalingen houden in het kosteloos repareren en retourneren. De kosten voor het verzenden naar

ons en eventuele overige kosten komen voor uw eigen rekening. De garantie vervalt bij defecten die zijn ontstaan door onrechtmatig gebruik of indien er reeds een poging tot reparatie is gedaan door personen die hiertoe niet zijn bevoegd.

Technische gegevens:

Voeding: 1,5 V batterij of NiMH-Accu (Type AA)
 Grootte: 56 x 71 x 18 mm
 Gewicht: 70 g
 Keurmerk: 
 Kleur: lichtgrijs



BA_NL_9250_MiniVib-Trilontvanger 11/00

Voor vergissingen of drukfouten zijn wij niet aansprakelijk. Wijzigingen voorbehouden.
 HGT Nederland • Postbus 435 • 3800 AK Amersfoort
 Telefoon: 033 48 00 340 • Teksttelefoon: 033 48 00 341 • Telefax: 033 48 00 342
 Internet: <http://www.hgt.de> • E-Mail: hgt-nl@hetnet.nl

MiniVib-Trilontvanger Type 92.5



Gebruiksaanwijzing





Betekenis van de symboollampjes:

- Looplicht: Kanaal is nog niet ingesteld
- Een symboollampje brandt: Een signaal wordt gemeld
- Middelste lampjes knipperen: Geen zend/ontvang verbinding
- Buitenste lampjes knipperen: Batterij verwisselen

Proficiat!
U heeft gekozen voor de betrouwbare en gebruikersvriendelijke HGT-MiniVib!

Algemene informatie over het MiniVib-systeem.

Om de MiniVib-trilontvanger te kunnen gebruiken is ook de MiniVib-zender noodzakelijk. De MiniVib-trilontvanger waarschuwt u middels tril- en knippersignalen voor belangrijke geluiden die door de MiniVib-zender worden doorgegeven.

In gebruik nemen. Batterij aanbrengen/wisselen.

U heeft nodig een 1,5V batterij van het type AA. Schuif de deksel van het batterijvak aan de achterzijde van de trilontvanger opzij en neem eventueel de oude batterij eruit. Leg de nieuwe batterij met de plus-pool (ronde kant) naar voren erin. Zie ook de afbeelding in het batterij-vak.

Programmeer na iedere batterij-wissel opnieuw het zendkanaal!
Na iedere batterijwissel moet het zend-

kanaal opnieuw worden geprogrammeerd. Dit doet u door na het wisselen van de batterij eenmaal op de groene knop op de MiniVib-zender te drukken.

Let op! Als de trilontvanger na de laatste batterij-wissel al een keer is geprogrammeerd, moet, om de trilontvanger opnieuw te programmeren, de aanwezige batterij er ca. 10 seconden uitgehaald worden om een batterijwissel te simuleren.

Aanwijzingen voor het gebruik. Het trillen beëindigen als de MiniVib een signaal meldt.

Ieder geluidssignaal in uw woning wordt middels een eigen trilirme met bijbehorend symboollampje weergegeven op de trilontvanger. Het symboollampje brandt 30 seconden. Als u het trillen en het branden van het symboollampje wilt beëindigen, drukt u kort op het witte HGT-knopje.

Geheugenfunctie.
Als u het HGT-knopje indrukt en weer loslaat, gaat het symboollampje branden van het signaal dat als laatste is

ontvangen.

Batterij-test.

U kunt de batterij controleren door het witte HGT-knopje in te drukken en vast te houden.

De trilontvanger trilt nu 1,5 seconde en met behulp van de symboollampjes wordt u geïnformeerd over de toestand van de batterij. Zie onderstaande aanduiding.

0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 Volt



leeg middel vol HGT

U moet de batterij vervangen indien er slechts een of twee symboollampjes gaan branden of als u het trillen te zwak vindt. Denkt u eraan dat u na elke batterij-wissel de trilontvanger opnieuw moet programmeren op de zender!

Automatische batterij-test.

De conditie van de batterij wordt ook regelmatig automatisch getest. Voordat de batterij leeg is, wordt u hiervoor gewaarschuwd doordat de twee buitenste symboollampjes afwisselend knip-

peren. U dient nu de batterij te vervangen.

Handmatige controle van de zend/ontvang-verbinding.

Als u het witte HGT-knopje langer dan 1,5 seconde ingedrukt houdt, wordt de batterij-test vanzelf beëindigd (het trillen stopt). Vervolgens lichten alle symboollampjes van de aangesloten licht-systeem-zenders op. U weet nu dat de verbinding met deze zenders goed is.

Automatische controle van de zend/ontvang-verbinding.

Wanneer uw MiniVib trilontvanger langer dan twee minuten geen controle-signaal van de zender ontvangt, meldt hij dit middels drie korte trillingen. Bovendien gaan de twee middelste symboollampjes afwisselend knipperen. Dit betekent dat er iets mis is met de zend/ontvang-verbinding. De oorzaak hiervan kan zijn dat u uit het ontvangst-bereik bent gegaan of een stroomstoring bij de MiniVib-zender.

Test op juiste werking.

Druk op de groene knop op de MiniVib-zender. De trilontvanger moet nu