


Technische gegevens:

Voeding:	230 V~, 50 Hz, 2 Watt
Grootte:	82 x 134 x 83 mm
Gewicht:	ca. 230 g
Keurmerk:	
Kleur:	wit
Toebehoren:	7 m kabel met oproepknop

hgt.
Nederland

Voor vergissingen of drukfouten zijn wij niet aansprakelijk. Wijzigingen voorbehouden.
HGT Nederland • Postbus 435 • 3800 AK Amersfoort
Telefoon: **033 48 00 340** • Teksttelefoon: **033 48 00 341** • Telefax: **033 48 00 342**
Internet: <http://www.hgt.de> • E-Mail: hgt-nl@hetnet.nl

BA_NL_5420_Personenoproepzender 11/00

Personenoproep-zender Type 54.2



Gebruiksaanwijzing

hgt.

● Personenoproep-zender

Ingebouwde wandcontactdoos voor alle apparatuur tot 3000W



Testknop

7 m kabel met oproepknop

Proficiat!

U heeft gekozen voor het betrouwbare en gebruikersvriendelijke HGT-VisiBel-systeem.

Algemene informatie over het HGT-VisiBel-systeem

Het HGT-VisiBel-systeem bestaat uit zenders, ontvangers en enkele apparaten die niet zenden of ontvangen. De zenders vangen belangrijke geluiden in huis (bijvoorbeeld personenoproep) op en zenden vervolgens een signaal via het 230V-lichtnet naar de ontvangers. De ontvangers zetten het signaal om in flitsen of schakelen een lamp.

8 zendkanalen

De zendkanalen maken het mogelijk om maximaal 8 lichtsystemen binnen een gebouw te gebruiken, zonder dat deze elkaar storen. Om alle zenders en ontvangers in uw woning goed te laten samenwerken, dient u alle apparaten op dezelfde letter in te stellen. Dit doet u met de kanaalschijf die zich aan de achterkant van elk apparaat bevindt.

Controle-Code-Systeem

De zenders van het HGT-VisiBel-systeem zenden eenmaal per minuut een controle-sigitaal uit. Als een ontvanger deze code ontvangt, geeft hij door middel van een functie-controlelampje of een symboollampje aan dat de zend/ontvang-verbinding in orde is. Een korte blik op uw flitslamp geeft u zo meteen de zekerheid dat uw HGT-VisiBel-systeem storingsvrij functioneert.

Zo werkt de personenoproepzender.

De personenoproepzender is een zender van het HGT-VisiBel-systeem. Het drukken op de oproepknop wordt door de ingebouwde electronica herkend en omgezet in een signaal. Dit signaal wordt via het lichtnet verzonden naar de ontvangers van het HGT-VisiBel-systeem.

Flitsritme

Als er op de oproepknop wordt gedrukt geven de ontvangers het bij de perso-

nenoproep behorende flitsritme weer.

Flitsritme personenoproep-zender:

** ** * ** * ** * ** *

Aansluiten van de personenoproepzender

Steek de zender in een wandcontactdoos.

Ingebouwde wandcontactdoos

De wandcontactdoos op de voorkant van het apparaat vervangt de wandcontactdoos die u door de personenoproepzender kwijtraakt. U kunt deze gebruiken voor alle elektrische apparatuur tot 3000W.

Test op juiste werking.

Met de rode testknop links onder op de personenoproepzender kunt u testen of de zend/ontvang-verbinding tussen de personenoproepzender en de ontvangers van uw HGT-VisiBel-systeem in orde is.

Zodra u op de rode knop drukt, zendt het apparaat eenmaal. Alle ontvangers van uw HGT-VisiBel-systeem moeten nu 8 maal 2 keer flitsen. Bij ontvangers met vier symbolen moet bovendien het babyfoonsymbool gaan branden. Bij ontvangers met zes symbolen moet het personenoproep-symbool (☎) gaan branden.

Wat te doen bij storingen?

Als uw HGT-VisiBel-systeem niet naar behoren werkt, controleert u dan eerst of alle zenders aan staan (rode knopje ingedrukt). Controleer ook of alle zenders en ontvangers wel op hetzelfde kanaal staan ingesteld.

Als u de oorzaak niet kunt vinden, belt u ons dan gerust. Wij helpen u graag.